



HAYVAN HASTANESİ ECZANESİ - INFUMİX CİHAZI KULLANIM TALİMATI

DOK.KOD.NO : BYG-TL.19. Yayın Tarihi: 16.12.2019

Rev No / Tarihi :

Sayfa No: 1 / 1

1. AMAÇ:

Bu prosedürün amacı, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi eczanesi içerisinde bulunan ve ilaçların hazırlanması için kullanılan cihazın, güvenilir ve sağlıklı bir şekilde kullanımına devam etmektir.

2. SORUMLULUK:

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Eczane Birimi personeli sorumludur.

3. UYGULAMA:

- Cihazın fişi takılır.
- Infukit takılır.
- Cihazın arka kısmındaki kilitleme aparatı ile kit cihaza sabitlenir.
- Kalibrasyon için, kol yukarı yönde sonuna kadar itilir.
- Gövde üstünde bulunan yeşil renkli düğmeye uzunca (10 saniye kadar) basılır.
- Tekrar yeşil düğmeye basıldığında kalibrasyon tamamlanır.
- Cihaz, istenilen ilacın hazırlanması için uygun hale gelmiştir.
- Gövde üstünde bulunan mavi renkli düğme dijital ekrandaki cc göstergesini sıfırlar.
- Cihazda 3 kademe hız ayarı vardır (yavaş-orta-hızlı).
- İlaç hazırlandıktan sonra, cihazdan infukiti çıkarmak için kol aşağı yönde itilir.
- Infukit sökülür.
- Cihazı kapatmak için fişi çıkarılır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
BÖLÜM: YÖNETİM TEMSİLCİSİ	BÖLÜM : VETERİNER FAKÜLTESİ
İMZA :	DEKANI
	İMZA :